



SWISS MADE



# Hüftprotektoren – Wertvolles schützen



**CE** Sicherheit · Sécurité · Sicurezza

## PD Care Funktionshosen

---

### Material

Die PD Care Funktionshosen sind aus hochwertiger Baumwolle und Lycra hergestellt. Unsere Schweizer Produkte zeichnen sich durch Dauerhaftigkeit und hochstehende Qualität aus.

Produziert bei **HANRO** OF SWITZERLAND. Sie kann auch als [Inkontinenz-Hose](#) (mit Einlagen) getragen werden.

### Protektortaschen

Die seitlichen Taschen für die Protektoren sind so eingearbeitet, dass sie gut sitzen und bei Stürzen optimal positioniert sind. Die Protektoren sind einfach einzusetzen und wieder zu entfernen. Bei Nichtgebrauch entfernen Sie die Protektoren aus den Protektortaschen. Die Taschen sind ohne Klettverschluss gut abgeschlossen und somit auch keine Gefahr für andere Kleidungsstücke.

### Tragekomfort

Hochelastische Bund- und Beinabschlüsse gewährleisten höchstmöglichen Tragekomfort und ein mit wenig Kraftaufwand verbundenes An- und Ausziehen. Die gute Passform und die Elastizität ermöglichen eine optimale und angenehme Platzierung von Inkontinenzmaterial.

### Waschen / Lebensdauer

Für eine möglichst lange Lebensdauer empfehlen wir eine Waschtemperatur bis 60° C. So gepflegt bleibt die hochwertige Qualität auch **nach über 200 Waschgängen** erhalten. Das Einlaufen nach dem ersten Waschgang ist bei den Bund- resp. Hüftmassen bereits berücksichtigt. [Die Waschanleitung finden Sie in der linken Protektorentasche.](#) Das Greifen mit scharfkantigen Fingernägeln unter den Bund ist zu vermeiden!

### Grössenangaben

PD-Care Funktionsgrösse	Kleidergrösse Damen	Kleidergrösse Herren	Bund in cm	Hüfte in cm
XS	34–36	42–44	61– 80	75– 84
S	38	46	66– 86	79– 90
M	40	48–50	71– 92	84– 99
L	42	52–54	76– 99	90–108
XL	44	56–58	82–108	97–117
XXL	46–48	60	88–118	105–126
3XL	50	62	94–130	114–136

Bei Inkontinenz geben Sie zu Ihrem gemessenen Hüftmass, je nach Stärke, 2 – 8 cm dazu.

Unsere Protektoren sind die am meist geprüften und sind in Ihrem Schutzverhalten unübertroffen. Geprüft an der EMPA St. Gallen (Eidgenössische Materialprüfung- und Forschungs-Anstalt)

Personifizierte Resultate zeigen, dass unser Hüftschutzsystem zu den besten zählt und den höchsten Empfehlungsgrad erreicht.

Auf Voranmeldung sind die Prüfungsberichte und Testreihen an unserem Firmensitz einsehbar.

---

## PD Care Protektoren

---

### Material und Wirkung

Der PD Care Protektor wurde aus einem neuartigen Schaumstoff hergestellt. Dieser unterscheidet sich von herkömmlichen Schaumqualitäten durch sein viskoelastisches Verhalten. Die Reaktion des Protektors ist von der Krafteinwirkung abhängig. Bei langsamer Krafteinwirkung zeigt er ein elastisches Verhalten, bei schockartiger Krafteinwirkung wird er härter. Das Verhalten ändert sich auch mit der Temperatur – durch die Körpertemperatur wird der Schaumstoff beim Tragen weicher und passt sich dem Körper an. Testen Sie es: Halten Sie den Protektor unter warmes fließendes Wasser.

Viskoelastische Schaumstoffe haben sich seit Jahren als wirksames Polstermaterial bei der Dekubitus-Vorsorge bewährt.

Hüft-Protektoren von PD Care schützen rund **70%** der gefährdeten Personen vor Hüftfrakturen.

### Lebensdauer

Für einen optimalen Schutz empfehlen wir, die Protektoren jeweils nach zwei- bis dreijährigem Gebrauch zu ersetzen. Protektoren, die bei korrekter Handhabung innerhalb des Verbrauchsdatums (siehe unter EXP. auf der Innenseite des Protektors) Schaden nehmen, werden **kostenlos ersetzt**.

### Tragekomfort

Das Material ist weder zu hart noch zu weich, es passt sich genau und fest den Körperkonturen und der Körpertemperatur an und sorgt somit für eine gleichmässige Druckverteilung. Druckstellen auf der Haut werden wirkungsvoll vermieden.

Durch diese Eigenschaften können die PD Care Protektoren auch problemlos nachts getragen werden. In der Liegeposition passt sich das Material ideal dem Körper an – beim Aufstehen erhält es innerhalb weniger Sekunden wieder seine ursprüngliche Form. Falls Sie den Wunsch haben die Protektoren auf der Aussenseite zu positionieren, muss das Schweizerkreuz auf der Hose somit rückseitig gegen aussen getragen werden. Somit ist ebenfalls gewährleistet, dass die Protektoren richtig positioniert sind.

### Hygiene und Reinigung

Die Protektoren sind vor dem Waschen der Funktionshosen zu entfernen und **dürfen nicht in der Waschmaschine mitgewaschen werden**. Wir empfehlen, die Protektoren jeweils kurz mit Spülmittel abzuwaschen.

### Gebrauchsanweisung

Schieben Sie die Protektoren mit der flachen Seite nach innen und der breiten Seite nach oben in die seitlichen Taschen der Funktionshose.

### Einsetzen und Entfernen der Protektoren

- 1) Innenseite der Funktionshose nach aussen wenden
  - 2) Mit beiden Daumen in die Abdecklasche der Protektortasche greifen und die Innenseite der Lasche nach aussen drehen
  - 3) Protektor einsetzen und die Abdecklasche darüber stülpen
-

## Sortiment PD Care Hosens

---

### Modell Standard – (MS)

PD Care Hose unisex mit Elast, weiss oder holunder robust und langlebig (Grössen S – 3XL)

### Modell Weichbund – (MW)

PD Care Hose mit Weichbund, weiss weich und hochelastisch (Grössen XS – XXL)

### Modell Herren – (MH)

PD Care Herrenhose, holunder/schwarz sportlich mit Eingriff (Grössen S – XXL)

### Modell De Luxe – (MD)

PD Care Hose mit Beinabschlüssen aus Spitzen, merzerisierte Baumwolle, produziert bei Hanro

### Modell Standard – (MSS)

PD Care Hose mit zusätzlichem Steissbeinschutz



## Sortiment PD Care Protektoren

---

### Modell Soft – (MS)

PD Care Protektor-Paar (Einheitsgrösse) Standard

## Kit-Varianten

---

### Kit 1

Bestehend aus 3 Hosen und 1 Protektoren-Paar

### Kit 2

Bestehend aus 4 Hosen und 1 Protektoren-Paar

---



PD Care GmbH

Binzstrasse 15c · CH-8712 Stäfa

Tel. +41 44 480 02 20

Fax +41 44 481 15 11

Mobile: +41 79 608 96 86

info@pdcare.ch · www.pdcare.ch

  
**TEXTILES  
VERTRAUEN**  
Schadstoffgeprüfte Textilien  
Tested for harmful substances  
nach / according to Öko-Tex Standard 100  
Prüf-Nr. 98.0.1773 · FI Hohenstein