



Articolo	Descrizione	Misura	Pezzi
6000	Starter	3 misure	3 pezzi
6100-05	Cubo 1	32x32 mm	5 pezzi
6150-05	Cubo 2	37x37 mm	5 pezzi
6200-05	Cubo 3	42x42 mm	5 pezzi
6205-05	Cubo 4	50x50 mm	5 pezzi
6210-05	Cubo 5	55x55 mm	5 pezzi

Scopo dell'uso:

Il tampone vaginale di Contam in forma di cubo può essere utilizzato per il trattamento di vari gradi di prolasso vaginale e uterino e di disturbi della svuotamento della vesica.

Applicazione e modalità d'azione:



Applicazione corretta per il prolasso uterino. Il cubo è inserito abbastanza in profondità nella vagina.

CE 0197

Med SSE System



Applicazione corretta per il prolasso utero con debolezza vescicale nascosta. Il cubo posizionato centralmente esercita una pressione aggiuntiva sulla zona dell'uretra!

Istruzioni per l'uso e applicazione

- Prima dell'uso lavarsi accuratamente le mani
- Liberare il tampone dal cellofan
- Lasciare ammorbidire il tampone in acqua tiepida per ca. 1 minuto
- Strizzarlo, per far uscire l'acqua assorbita. Il tampone in tal modo diventa morbido ed elastico ed è pronto all'uso
- Il tampone si inserisce come un normale assorbente interno. Sistemarsi in una posizione comoda. Si può mettere, per esempio, un piede su uno sgabello o ci si può sedere sul bordo del water.
- Applicazione per il prolasso uterino:**
A Inserire Contam® in profondità nella vagina con la punta delle dita.
- Applicazione per il prolasso uterino con debolezza vescicale:**
B Posizionare il cubo Contam® al centro per esercitare una pressione aggiuntiva sull'area dell'uretra.
- Se si prova un senso di fastidio, spostare, con un dito, il tampone in una posizione non più fastidiosa. La parte centrale della vagina è poco sensibile. Quindi il tampone se posizionato correttamente, non dà un fastidio.
- L'estremità del cordoncino di estrazione deve trovarsi al di fuori del corpo
- Anche per l'estrazione del tampone mettersi in una posizione comoda. Tirare il cordoncino di estrazione cercando la direzione più facile.
- Inserire il tampone già utilizzato in un sacchetto e gettarlo tra i rifiuti domestici. Dopo aver stratto il tampone lavarsi accuratamente le mani.



Non è necessario rimuovere il tampone Contam® durante la minzione.

Istruzioni di sicurezza

- Il tampone deve essere cambiato dopo il nuoto o il bagno.
- Se, nonostante l'attento controllo, il filo di recupero si dovesse rompere inaspettatamente, provare ad afferrare e rimuovere il tampone con due dita schiacciandolo nella tozza - come per i movimenti intestinali. Se questo non funziona, consultare immediatamente un medico.
- Contam è un prodotto monouso!
- Il tampone non deve rimanere nella vagina per più di 12 ore. I pazienti che non sono in grado di garantire il rispetto di queste durate non devono usare Contam.
- Se febbre, diarrea, vomito, sanguinamento, vertigini o irritazione cutanea si verifica improvvisamente durante l'uso di Contam, è necessario rimuovere immediatamente e consultare un medico.

Controindicazioni:

Allergia al PVA - mestruazione - nel sonno o nell'infiammazione - durante la gravidanza è necessario contattare un medico

Simboli: CE numero CE

- monouso
- Attenzione alla modalità
- Produttore
- scadenza
- numero di Lotto

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso.



SINI - MEDIK

Distributore:
SINI-MEDIK Niederreiter GmbH
 Fabrikstrasse 2
 A-6460 Imst

mail: ordini@sini-medik.com