



SWISS MADE




Protettori per anche – La salute: un bene da proteggere



CE Sicherheit · Sécurité · Sicurezza

PD Care – Pantaloncini funzionali

Materiale

I pantaloncini funzionali PD Care sono prodotti con cotone e lycra di ottima qualità. Gli articoli della nostra ditta produttrice svizzera si contraddistinguono per durata e qualità di alto livello. Produzione . Può essere indossato come **pantalocino per l'incontinenza** (con depositi).

Tasche per salva-anche

Le tasche laterali per i salva-anche sono realizzate in modo tale da avere una buona aderenza e da mantenere una posizione ottimale in caso di caduta. I salva-anche sono semplici da infilare e sfilare. Togliere i salva-anche dalle apposite tasche in caso di non utilizzo. Le tasche si chiudono bene anche senza nastro a velcro e quindi non costituiscono alcun pericolo per altri capi di abbigliamento.

Comfort

L'elevata elasticità dei bordi vita e gambe garantisce il massimo comfort possibile e lo sforzo per infilare e sfilare i pantaloncini è veramente minimo. La buona aderenza ed elasticità consentono di applicare in modo ottimale e confortevole anche materiale per incontinenza.

Lavaggio/Durata

Per garantire la maggior durata possibile si consiglia una temperatura di lavaggio di 60° C. Così mantenuto la qualità del prodotto rimane intatta anche **dopo più di 200 lavaggi**. Il restringimento dopo il primo ciclo di lavaggio a livello della vita e delle anche è già calcolato. **Nella tasca sinistra del pantaloncino troverete l'etichetta modalità di lavaggio**. Evitare di tirare su la cintura con unghie affilate!

Indicazioni sulle taglie

PD-Care Taglia funzionale unisex	Taglia abbigliamento donna	Taglia abbigliamento uomo	Vita in cm	Anche in cm
XS	34–36	42–44	61– 80	75– 84
S	38	46	66– 86	79– 90
M	40	48–50	71– 92	84– 99
L	42	52–54	76– 99	90–108
XL	44	56–58	82–108	97–117
XXL	46–48	60	88–118	105–126
3XL	50	62	94–130	114–136

In caso di incontinenza aggiungere alla misura delle anche, in base allo spessore, 2–8 cm.

I nostri protettori sono quelli più controllati e restano insuperati nelle loro caratteristiche qualitative di protezione. Controllo presso EMPA (Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca)

Risultati di esperienze dirette comprovano che il nostro sistema protettivo dei fianchi è tra i migliori e raggiunge i più alti livelli di consigliabilità.

Materiale ed efficacia

Il salva-anche PD Care è stato realizzato con un materiale espanso di nuova concezione, che si distingue dalle qualità dell'espanso tradizionale per il proprio comportamento viscoelastico. La reazione del salva-anche dipende dalle forze applicate. Ad un carico applicato in modo lento, il salva-anche reagisce con un comportamento elastico, mentre ad un carico applicato in modo traumatico reagisce con maggiore rigidità. **Fino al 70% di tutte le fratture d'anca possono quindi essere prevenute.** Il comportamento varia anche in funzione della temperatura – la temperatura corporea rende infatti il materiale espanso indossato più morbido e aderente al corpo. **Fate una prova: tenete il protettore sotto acqua corrente calda.**

Da anni i materiali espansi viscoelastici si sono affermati anche come efficaci sistemi di imbottitura nella cura delle piaghe da decubito. Inoltre questi protettori viscoelastici sono impiegati con successo anche nel mondo delle corse in moto ed in altre discipline sportive.

Durata

Per una protezione ottimale si consiglia la sostituzione dei protettori dopo due – tre anni di utilizzo. Soltanto i protettori che sono stati danneggiati prima della data di scadenza (vedere all'interno guardie) **verranno sostituiti gratuitamente.**

Comfort

I salva-anche sono regolati sulla temperatura corporea e in questo range di temperatura offrono la vestibilità ideale che li contraddistingue.

Il materiale non è troppo rigido e neppure troppo morbido, aderisce perfettamente e saldamente ai contorni del corpo e garantisce una distribuzione regolare della compressione. Eventuali punti di compressione sulla pelle vengono evitati con efficacia.

Grazie a queste caratteristiche i salva-anche PD Care possono essere indossati senza problemi anche di notte. In posizione distesa il materiale si adatta perfettamente al corpo e quando ci si alza riacquista nell'arco di pochi secondi la propria forma originale. Se volete posizionare le protezioni all'esterno, le mutande devono essere indossate al rovescio e la croce svizzera rivolta verso l'esterno. Il corretto posizionamento delle protezioni è quindi garantito.

Igiene e pulizia

I protettori devono essere rimossi prima del lavaggio dei pantaloni e **non devono essere lavati insieme ad essi nella lavatrice.** Consigliamo di pulire i protettori con un breve lavaggio manual usando un detersivo per stoviglie.

Istruzioni d'uso

Applicare il salva-anche attenendosi alle istruzioni stampate sul lato interno dello stesso salva-anche.

Come mettere e togliere i protettori di anche

- 1) Capovolgere l'interno delle mutandine funzionali verso l'esterno.
 - 2) Entrare con ambi i pollici nella striscia che copre e protegge la tasca per i protettori e così capovolgerla verso l'esterno.
 - 3) Far scivolare entro la tasca il protettore e coprirlo con la striscia di protezione (che avevate sollevato – vedi 2.)
-

Assortimento pantaloncini PD Care

Modello Standard – (MS)

Pantaloncini PD Care unisex con Elast, col. bianco o sambuco/nero, robusti e duraturi, (taglie S – 3XL)

Modello vita morbida – (MW)

Pantaloncini PD Care a vita morbida, col. bianco morbidi e molto elastici, (taglie XS – XXL)

Modello Uomo – (MH)

Pantaloncini da uomo PD Care, sambuco/nero sportivo con finta, (taglie S – XXL)

Modello De Luxe – (MD)

Pantaloncini PD Care con conclusione del piedino in pizzo, in cotone mercerizzato prodotto da Hanro

Modello Standard – (MSS)

Pantaloncini PD Care unisex con una protezione del coccige integrata



Assortimento protettori PD Care

Modello Soft – (MS)

Un paio di protettori PD Care (taglia unica) standard

Varianti del kit

Kit 1

Contiene 3 pantaloncini ed 1 paio di protettori

Kit 2

Contiene 4 pantaloncini ed 1 paio di protettori



PD Care GmbH

Binzstrasse 15c · CH-8712 Stäfa

Tel. +41 44 480 02 20

Fax +41 44 481 15 11

Mobile: +41 79 608 96 86

info@pdcare.ch · www.pdcare.ch

**TEXTILES
VERTRAUEN**
Schadstoffgeprüfte Textilien
Tested for harmful substances
nach / according to Öko-Tex Standard 100
Prüf-Nr. 98.0.1773 · FI Hohenstein